

Guide de démarrage rapide Symphony®

Scannez pour consulter le
Symphony Hub et obtenir des
instructions simples étape par
étape et des vidéos



Programme INITIATE



INITIATION
DE LA LACTATION :

APRÈS LA NAISSANCE



Séance d'expression
= 15 min

Phases de stimulation,
phases d'expression
et pauses

1



Lorsque **20 ml ou plus** sont
exprimés des **deux seins combinés**,
au cours d'une séance d'expression

ou

2



Lorsque des marqueurs
physiologiques de la montée
du lait* apparaissent

*sensation de seins pleins

ou

3

Jour 6

Passez au
programme MAINTAIN
au plus tard le 6e jour

Quand passer du
programme INITIATE au
programme MAINTAIN ?



Programme MAINTAIN

AMPLIFICATION ET
MAINTIEN DE LA
LACTATION



Séance d'expression
≥ 15 min

2-Phase Expression
(phase de stimulation et
d'expression)



Remarque : Ce guide rapide ne remplace pas le mode d'emploi complet.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi du Symphony.

Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher vos seins, ainsi que les sets pour tire-lait et le tire-lait.

Programme INITIATE

Vous pouvez voir que ce programme est en cours d'exécution grâce à ces symboles à l'écran : ●●●●



Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt



Appuyez sur le bouton d'écoulement dans un délai de 10 secondes pour utiliser le **programme INITIATE**



Réglage du vide de confort maximal



REMARQUE : le programme se termine automatiquement

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Suisse



© Medela AG 101046975/2024-04/B

Programme MAINTAIN

Vous pouvez voir que ce programme est en cours d'exécution grâce à ces symboles à l'écran : ●●●●



Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt



Le **programme MAINTAIN** va automatiquement commencer par la phase de stimulation



Si le lait commence à s'écouler avant que les deux minutes ne se soient écoulées, appuyez sur le bouton d'écoulement pour passer directement à la phase d'expression. Au bout de 2 minutes en phase de stimulation, le tire-lait passe automatiquement à la phase d'expression.



Réglage du vide de confort maximal



REMARQUE : le programme ne se termine pas automatiquement

IMPORTANT !

Pour une efficacité, une efficacité et un confort maximaux, réalisez toujours une double expression avec un vide de confort maximum et des tétérilles correctement ajustées. Consultez la page Web www.medela.com/fittingguide pour déterminer la taille de tétérille qui vous convient.

Réglez le **vide de confort maximum** qui vous convient en tournant le bouton de réglage de l'aspiration vers la droite pour augmenter l'aspiration jusqu'à ce que vous ressentiez une légère gêne. Puis, tournez-le vers la gauche pour réduire l'aspiration jusqu'à ce que cela soit confortable.

medela 
THE SCIENCE OF CARE™