

Guida rapida Symphony®

Scansiona per visitare
Symphony Hub:
video e istruzioni
intuitive



Programma INITIATE



AVVIO DELLA
PRODUZIONE
DI LATTE

DOPO IL PARTO



Sessione di estrazione
= 15 minuti

Fasi di stimolazione,
fasi di estrazione
e pause

Quando occorre passare
da **INITIATE** a **MAINTAIN**?

1



Una volta estratti **20 ml o più**
di latte da **entrambi i seni**,
durante una sessione di estrazione

oppure

2



Quando diventano
visibili i marker fisiologici
della montata lattea*

*sensazione di pienezza del seno

oppure

3

Giorno 6

Passare al
programma MAINTAIN
entro e non oltre il giorno 6



Programma MAINTAIN

SVILUPPO
E MANTENIMENTO
DELLA LATTAZIONE



Sessione di estrazione
≥ 15 min

2-Phase Expression
(fase di stimolazione
ed estrazione)



Nota: Questa guida rapida non sostituisce le istruzioni per l'uso complete.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso di Symphony.

Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare il tiralatte, i set per tiralatte e il seno.

Programma INITIATE


Quando il programma è in funzione, sullo schermo appaiono i seguenti simboli:



1. Accendere il tiralatte



2. Premere il tasto di erogazione entro 10 secondi per avviare il **programma INITIATE**

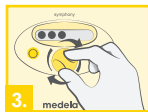

3. Impostare il massimo vuoto confortevole



NOTA:

il programma termina automaticamente

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Svizzera



© Medela AG 101046976/2024-04/B

Programma MAINTAIN

Quando il programma è in funzione, sullo schermo appaiono i seguenti simboli:



1. Accendere il tiralatte

attendere ▶



Il **programma MAINTAIN** si avvia in automatico con la fase di stimolazione



Se il latte inizia a fluire prima che siano trascorsi i due minuti, premere il tasto di erogazione per passare direttamente alla fase di estrazione. Dopo 2 minuti, si passa automaticamente dalla fase di stimolazione alla fase di estrazione.

Impostare il massimo vuoto confortevole



NOTA: il programma non termina automaticamente

IMPORTANTE:

Per la massima efficacia, efficienza e comodità, ricorrere alla doppia estrazione con massimo vuoto confortevole e utilizzare coppe per il seno della misura corretta. Per trovare la misura giusta di coppa per il seno, visita: www.medela.com/fittingguide.

Regolare il **massimo vuoto confortevole** ruotando a destra la manopola per aumentare il vuoto fino ad avvertire un leggero fastidio. Ruotare, invece, la manopola a sinistra per ridurre l'aspirazione fino a raggiungere un livello confortevole.

medela 
THE SCIENCE OF CARE™