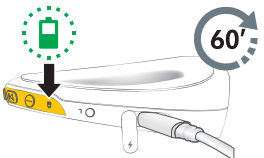
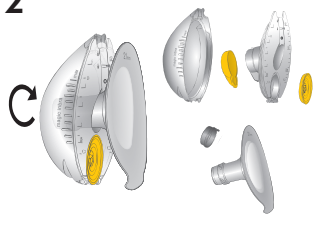
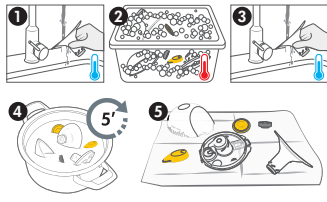
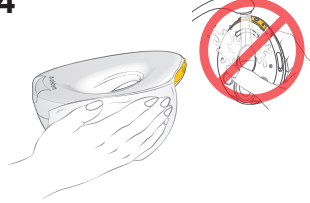
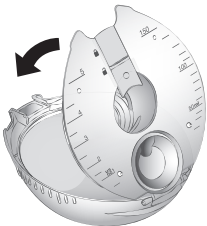
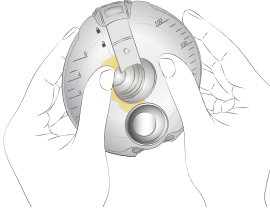

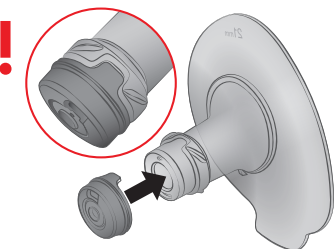
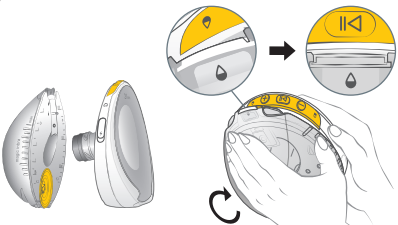




## Before First Use · Avant la première utilisation

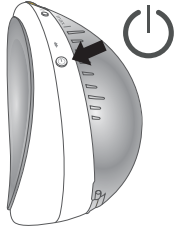


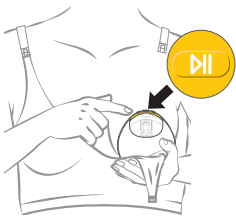
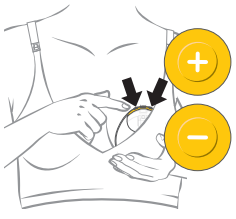
<p><b>1</b></p>  <p><b>Charge for 1 hour</b> Chargez pendant 1 heure</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>Disassemble Accessory Set</b> Démontez le Set d'Accessoires</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>Wash, boil, and let dry</b> Lavez, faites bouillir et laissez sécher</p>	<p><b>4</b></p>  <p><b>Wipe Motor Unit</b> Essuyez le bloc-moteur</p>
---	---	---	--

## Assemble · Assembler

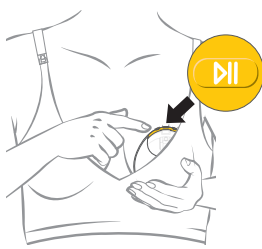
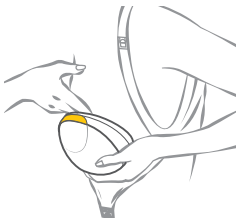

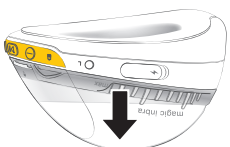
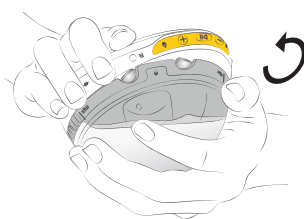
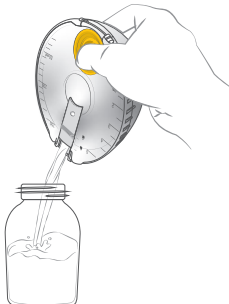
<p><b>1</b></p>  <p><b>Engage two hooks</b> Engagez les deux crochets</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>Attach · Fixez</b></p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>Close · Fermez</b></p>
<p><b>4</b></p>  <p><b>Push firmly</b> Appuyez fermement</p>	<p><b>5</b></p>  <p><b>Close · Fermez</b></p>	<p><b>6</b></p>  <p><b>Align · Assemblez</b></p>
<p><b>7</b></p>  <p><b>Align flap</b> Alignez la languette</p>	<p><b>8</b></p>  <p><b>Attach Breast Shield into Motor Unit</b> Fixez la tétérille dans le bloc-moteur</p>	<p><b>9</b></p>  <p><b>Rotate Container to attach</b> Faites pivoter le conteneur pour le fixer</p>



## Operating your breast pump · Fonctionnement de votre tire-lait

<p><b>1</b></p>  <p><b>Turn on</b> Mettez en marche</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>Select side</b> Sélectionnez le côté</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>Centre your nipple</b> Centrez votre mamelon</p>
<p><b>4</b></p>  <p><b>Start</b> Démarrez</p>	<p><b>5</b></p>  <p><b>Adjust vacuum</b> Réglez le vide</p>	

## After Pumping · Après l'expression du lait

<p><b>1</b></p>  <p><b>Pause · Pause</b></p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>Lean forward &amp; break latch</b> Penchez vous vers l'avant et retirez l'appareil</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>Place on a flat surface</b> Placez sur une surface plane</p>
<p><b>4</b></p>  <p><b>Milk collects automatically.</b> Few drops remain in the tunnel. Le lait est collecté automatiquement. Quelques gouttes restent dans le conduit.</p>	<p><b>5</b></p>  <p><b>Disassemble in a horizontal position</b> Démontez en position horizontale</p>	<p><b>6</b></p>  <p><b>Pour into bottle</b> Versez dans le récipient</p>

\*This Quick Start guide and the videos do not replace the Instructions for Use (IFU). Always refer to the IFU for safe and effective use.

\*Ce guide de démarrage rapide et les vidéos ne remplacent pas les Instructions d'utilisation. Veuillez toujours vous référer aux Instructions d'utilisation pour une utilisation sûre et efficace.