

Consigli e trucchi per rendere il tuo percorso di estrazione con Magic InBra™ semplice

1. Inizia leggendo le istruzioni per l'uso.
2. Assicurati di assemblare correttamente tutte le parti. Concentrati sulla membrana, le valvole e il coperchio del contenitore.
3. Se il tiralatte si ferma all'inizio della sessione:
 - a. Controlla il montaggio di tutte le parti. Quando lo smonti, assicurati che il tiralatte sia completamente spento.
 - b. Se il problema persiste, prova a usare una coppa di dimensioni più piccole per facilitare l'adesione del seno al tiralatte. Nella confezione sono incluse coppe da 21 mm e 24 mm. Le misure 18 mm e 27 mm sono disponibili per l'acquisto. Se hai dubbi sull'acquisto di una nuova misura, contatta il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.
4. Se il latte fuoriesce, assicurati che il coperchio del contenitore sia chiuso saldamente e in modo sicuro. Metti in pausa la pompa e versa il latte nel contenitore quando il livello raggiunge la linea "max"/130 ml. Ricorda che circa 20 ml devono ancora essere drenati dal tunnel nel contenitore.
5. Ti consigliamo di utilizzare sempre un livello di vuoto confortevole durante l'estrazione. Se l'estrazione risulta dolorosa, segui le istruzioni per trovare il tuo livello di comfort massimo. Il tiralatte memorizzerà questa impostazione per le sessioni successive. È inoltre importante rivalutare questo livello di vuoto ogni poche settimane o quando necessario.