

Medela Symphony® PLUS HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

BAŞLATMA programı

EMZİRMENİN
BAŞLATILMASI

doğumdan
sonra



24
saatte
8-12x

Pompalama ≈ 15 dakika
Uyarılma süreçleri,
pompalama aşamaları
ve molalar



Not: Bu hızlı başvuru kılavuzu, kullanım talimatlarının tamamının yerini almaz.
Daha fazla bilgi için lütfen Symphony kullanım talimatlarına bakın.

BAŞLATMADAN SÜRDÜRMEYE ne zaman geçilir?

1



Arka arkaya üç pompalamada,
tek seferde en az 20 ml süt sağılır



veya

2



Salgı aktivasyonunun*
fizyolojik işaretleri görünür
hale geldiğinde
*meme şişmesi hissi (süt gelir)

veya

3

6. gün +

En geç 6 gün sonra **SÜRDÜRME**
programına geçin



SÜRDÜRME programı

EMZİRMENİN
OLUŞTURULMASI VE
SÜRDÜRÜLMESİ

6. günden
itibaren




24
saatte
8-12x

Pompalama ≥15 dakika
2-Phase Expression
(uyarılma ve pompalama
aşaması)

BAŞLATMA programı

Programın çalıştığını ekranda görülen şu sembollerden anlayabilirsiniz:

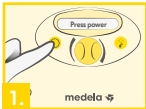

Güç düğmesine basın



BAŞLATMA programını kullanmak için "Let-down" düğmesine basın



Vakumu ayarlayın




NOT: Program otomatik olarak sona erer



youtu.be/1Jzah7CEaIQ

SÜRDÜRME programı

Programın çalıştığını ekranda görülen şu sembollerden anlayabilirsiniz:

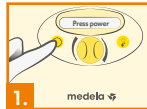

Güç düğmesine basın



Vakumu ayarlayın. 2 dakika sonra, sistem otomatik olarak pompalama aşamasına geçer (4.)



Vakumu yeniden ayarlayın




NOT: Program otomatik olarak sona ermez



youtu.be/5A0M6Gth0W6



10 saniye sonra **SÜRDÜRME** programı başlar

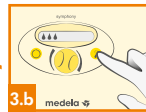

İki dakika geçmeden süt akmaya başlarsa, doğrudan pompalama moduna geçmek için "Let-down" düğmesine basın (4.)

!

ÖNEMLİ! VAKUMU DOĞRU AYARLAYIN VE GEREKİRSE KONTROL EDİN/DEĞİŞTİRİN

Her zaman rahat olan maksimum vakum seviyesini kullanın. Bu, en iyi süt akışını sağlamaya yardımcı olur ve pompalamayı en verimli hale getirir.