

Filter för medicinsk sugning

Teknisk information



Virus/bakterie- och luktfiler med överströmningsskydd



Virus/bakteriefiler med överströmningsskydd



Luktfiler



Virus/bakteriefiler



Bakteriefiler med överströmningsskydd med koniska kopplingar

Medela erbjuder en omfattande portfölj av engångsfilter som är smidigt kombinerbara med alla Medelas sugutrustningar. De gör det möjligt för vårdpersonal att specialanpassa sina sugsystem i enlighet med en rad olika hygienkrav.

Avsedd användning/avsett syfte

- Bakteriefiler hindrar bakterier från att komma in i pumpen och omgivningen.
- Överströmningsskydd förhindrar överströmning.
- Luktfiler skyddar omgivningen mot lukter. Det aktiva kolet neutraliserar lukt.
- Virusfiler hindrar virus från att komma in i pumpen och omgivningen.

Obs! Produkten ska användas med Medelas sugutrustningar och är dessutom testad för att användas med väggvakuumssystem enligt ISO 10079-3.

VARNING

- Det här är en engångsprodukt som inte är avsedd att återanvändas. Återanvändning kan medföra att mekaniska, kemiska och/eller biologiska egenskaper går förlorade. Återanvändning kan leda till smittöverföring.
- När man kombinerar delar från Medela och en tredje parts gränssnittsenhet, tar användaren ansvar för hela systemet och ska testa den nya kombinationen för att säkerställa att prestanda och säkerhet upprätthålls på rätt sätt.

NYKELSKILLNADER

Minimerar risken för infektion med ett högkvalitativt skyddssystem för både hälso- och sjukvårdspersonal och patient

Virus- och bakteriefiltersystem förhindrar korskontaminering med en filtreringseffektivitet som är högre än 99,9 %, vilket ger högkvalitativa skydds- och hygienstandards för både hälso- och sjukvårdspersonal samt patient (se diagram 1 på sidan 3).

Filtersorten är kompatibel med Medela Dominant Flex, Basic och Vario 18 Pump-portföljen och stödjer för att optimera skyddet mot infektionsrisken för kirurgiska ingrepp och luftvägsingrepp.

För optimala hygienstandards och undvikande av lukt

Bakteriefiler ger den första grundläggande nivån av hygieniskt skydd, ett grundläggande krav om sugsystemet inte innefattar ett inbäddat bakteriefiler.

- Överströmningfilter utgör en viktig säkerhetsmekanism som förhindrar att vätskor tränger in i pumpen eller det centrala vakuumsystemet. Två oberoende överströmningssystem ska finnas i alla sugsystem.
- Membran mot dålig lukt kapslar effektivt in gaser och lukter, vilket är speciellt användbart i behållare som används under flera timmars tid.
- För patienternas och sjukhuspersonalens säkerhet, ska pumpfilterbyten ske enligt den frekvens som anges i bruksanvisningen och i enlighet med relevanta lokala riktlinjer för infektionskontroll.
- Filtreringsskapacitet (bakteriefiler) 99,985 % för partiklar större än 0,3 µm.
- Filtreringsskapacitet (virusfiler) 99,99984 % för partiklar större än 0,03 µm.

Pålitlig med lång medicinsk expertis inom sugning

Medela har varit känd och betrodd i över 60 år* för medicinsk expertis inom sugning och erbjuder högkvalitativa lösningar för ett brett spektrum av kliniska applikationer, och den tekniska servicesupporten alltid är tillgänglig vid eventuella besvär. Läs vår bruksanvisning för mer information.

Filter med överströmningsskydd	
Bakteriefilter med överströmningsskydd	Artikelnummer
Medela-kopplingar	077.0571
Koniska kopplingar	077.0572

Virusfilter med överströmningsskydd	
Medela-kopplingar	101035263
Koniska kopplingar	101035264

Bakterie-/luktfilter med överströmningsskydd	
Vario 18 set	077.0834

FÖRSIKTIGHET
Sugningen avbryts om filtret blir blött/fuktigt eller täpps till. Testa filtret före varje patient.

Filter	
Bakteriefilter	Artikelnummer
Medela-kopplingar	077.0573

Virusfilter	
Medela-kopplingar	101035265

Bakterie-/luktfilter	
Medela-kopplingar	077.0575

FÖRSIKTIGHET
Sugningen avbryts om filtret täpps till. Testa filtret före varje patient.


- Filterbyte**
- I händelse av överströmning eller igensättning, eller
 - en gång i veckan vid enpatientsbruk, eller
 - dagligen vid flerpaticientsbruk.

Testa filtret innan det används på en ny patient för att upptäcka eventuella igensättningar.
Följ de lokala hygienföreskrifterna.

Tekniska data	
Filtreringskapacitet (bakteriefilter) för partiklar större än 0,3 µm	99,99999 %
Filtreringskapacitet (virusfilter) för partiklar större än 0,03 µm	99,99984 %
Dimensioner [mm]	100 x 62 x 36 mm (l/b/d) (filtrerande topp 50x50 mm)
Vikt [g]	~17–23
Material	PP (filtrerande topp)
Förpackningsenhet	10 st.

Tabell 1

Filtersystem från Medela skyddar mot bakterier med 99,9 % effektivitet.

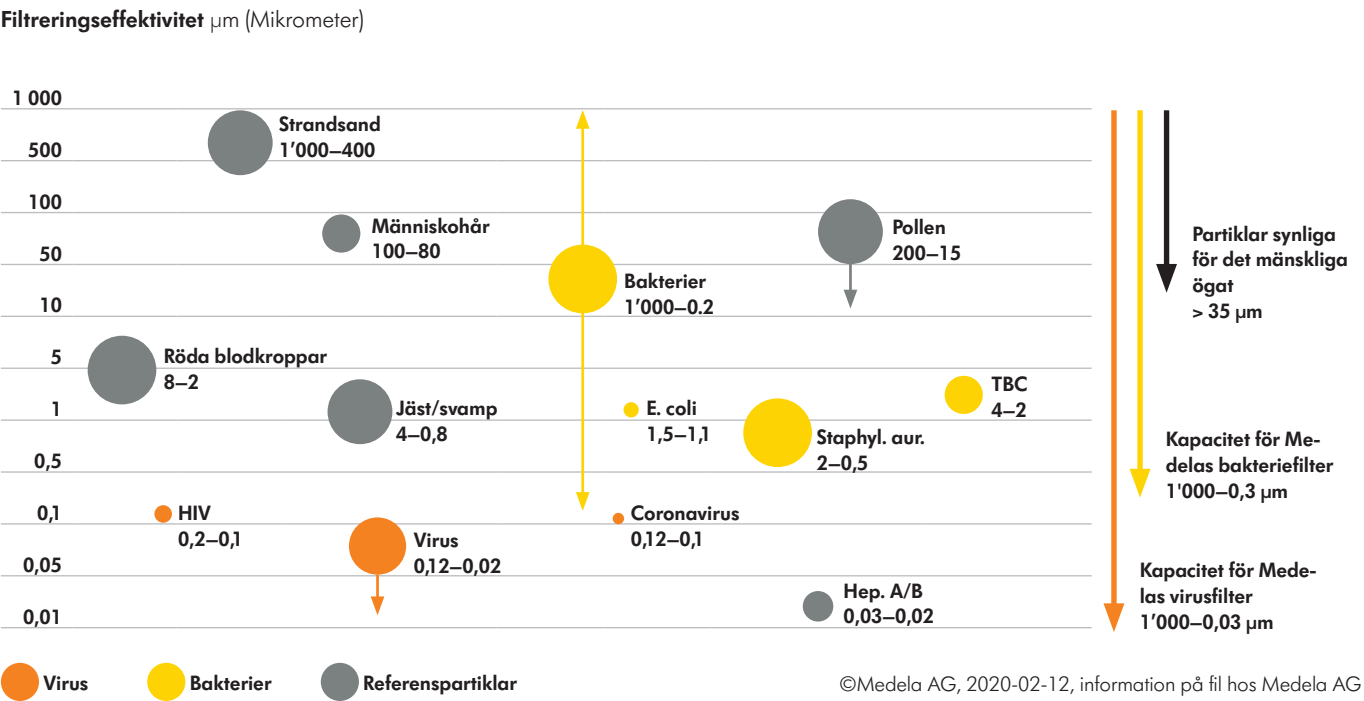

En översikt av fördelarna

- ✓ Labbtestad hög **virusavskiljningskapacitet på 99,99 %** för partiklar större än 0,03 µm
- ✓ **Stoppar alla typer av coronavirus:** 2019-nCoV, SARS-CoV, HCoV NL 63 och HKUI
- ✓ Filtrerar bort alla typer av virus och bakterier

Huvudsakliga kompatibla tillbehör	
Uppsamlingsystem för flergångsbruk	Artikelnummer
Flergångsset 1 l med PSU-sugbehållare	077.0715
Flergångsset 2 l med PSU-sugbehållare	077.0716
Engångssystem för uppsamling av vätska	Artikelnummer
PC-sugbehållare, 1,5 l	077.0082
Engångssugpåse 1,5 l	077.0083
Sugpåse för engångsbruk 1,5 l med förtjockningsmedel	077.0084
Slang, silikon (val av sortiment)	Artikelnummer
Silikonslang Ø 7 x 12 mm, utan hankoppling, 1 m	077.0901
Silikonslang Ø 7 x 12 mm, utan hankoppling, 2 m	077.0902
Silikonslang Ø 7 x 12 mm med 1 hankoppling, 60 cm	077.0912
Silikonslang Ø 7 x 12 mm med 1 hankoppling, 100 cm	077.0913
Silikonslang Ø 7 x 12 mm med 2 hankopplingar, 30 cm	077.0921
Silikonslang Ø 7 x 12 mm med 2 hankopplingar, 60 cm	077.0922
Silikonslang Ø 7 x 12 mm, 25 cm, med 1 hankoppling och 1 hankoppling 90°	077.0931
Slang, engångsansvändning	Artikelnummer
PVC-engångsslang, 180 cm, med fingertoppsreglage, steril	077.0951
Engångsslang, 180 cm, med fingertoppsreglage, inte steril	077.0952
Medela sugpumpar	Artikelnummer
Dominant Flex mobil (finns även som bärbara eller rackversioner)	071.0003
Basic mobil (finns även som bärbara eller rackversioner)	071.0001
Vario 18 AC/DC (finns även utan uppladdningsbart batteri)	026.5110

För mer information om Medelas produkter kan du besöka www.medela.com/en/surgical-woundcare



FÖRSIKTIGHET: Enligt federala lagar i USA får apparaten endast säljas av eller på uppdrag av medicinsk personal.

Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela-representant för mer information.

Sweden & Finland
Medela Medical AB
Kemistvägen 17
18379 Täby
Sweden
Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Schweiz
www.medela.se

Lokal kontakt